
	งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูง	เลขที่เอกสาร : SD-CL-00-041-01
	โรงพยาบาลศรีนครินทร์	ทบทวนล่าสุดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจงานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูง

1. ใบส่งตรวจไม่มีการระบุ ชื่อ-สกุล HN หรือระบุไม่ชัดเจน
2. ใบส่งตรวจไม่ระบุชนิดสิ่งส่งตรวจ
3. ใบส่งตรวจไม่ระบุรายการตรวจ
4. ชื่อผู้ป่วยในใบส่งตรวจไม่ตรงกับสิ่งส่งตรวจ งานห้องปฏิบัติการฯ จะไม่ส่งคืนสิ่งส่งตรวจให้กับผู้รับบริการ กลับไปแก้ไข ต้องทำการเก็บสิ่งส่งตรวจใหม่ หากผู้รับบริการมีความจำเป็นต้องใช้สิ่งส่งตรวจดังกล่าว ต้องส่งเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงเหตุผล พร้อมทั้งรับรองความถูกต้อง จากหัวหน้าตึก/หัวหน้าเวร หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย
5. ไม่มีใบส่งตรวจ หรือ ไม่มีสิ่งส่งตรวจ
6. ชนิดของสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง
7. เก็บสิ่งส่งตรวจใส่ภาชนะไม่ถูกต้อง
8. นำส่งสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง
9. ปริมาณไม่เพียงพอ หรือไม่ได้สัดส่วน
 - 9.1 เจาะเก็บใส่หลอด 3.2% Sodium citrate blood ยอมรับการเจาะเลือดได้ขาดหรือเกิน 10% ของปริมาตรหลอดเลือดที่ระบุ
 - 9.2 เจาะเก็บใส่หลอด EDTA blood ควรเจาะให้ได้ตรงตามปริมาตรหลอดเลือดที่ระบุ โดยยอมรับการเจาะเลือดได้ไม่น้อยกว่า 50% ของปริมาตรหลอดเลือด
10. ภาชนะแตก หกเลอะเทอะ
11. สิ่งส่งตรวจที่เก็บในหลอดที่มีสารกันเลือดแข็งจะต้องไม่ clot หรือ fibrin clot ได้แก่หลอด EDTA หลอด 3.2% Sodium citrate
12. สิ่งส่งตรวจด้าน coagulogram ที่แช่เย็นในขณะนำส่ง
13. สิ่งส่งตรวจที่มีลักษณะ Hemolysis ในการตรวจทาง coagulogram พลาสมาที่ปั่นแยกได้ต้องไม่มี Hemolysis ส่วนการตรวจทางภูมิคุ้มกันและเคมีคลินิก มีระดับ Hemolysis ได้ไม่เกิน 2+
14. หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจไม่นำส่งถึงห้องปฏิบัติการภายในระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่การส่งตรวจ Urinalysis, Urine culture ควรส่งปัสสาวะที่เก็บได้ถึงห้องปฏิบัติการฯ ภายในเวลา 2 ชั่วโมง
15. ในกรณีซีรัมเหลือง (Icteric serum) รับผิดชอบต่อค่าการดูกลืนแสง หากค่าเกินค่าช่วงวัดให้ทำการเจือจางแล้วตรวจวัดซ้ำอีกครั้ง
16. ในกรณีซีรัมขุ่นมีไขมัน (Lipemic serum) ปฏิเสธตัวอย่างเมื่อตรวจได้ค่า Serum Index check value ค่า L ตั้งแต่ 2000 ขึ้นไป และจะชี้แจงในใบรายงานผลการรับไว้ตรวจ ซึ่งซีรัมขุ่นมีไขมัน (Lipemic serum) อาจมีผลกระทบต่อค่าการดูกลืนแสง หากค่าเกินค่าช่วงวัดให้ทำการเจือจางแล้วตรวจวัดซ้ำอีกครั้ง

	งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูง		เลขที่เอกสาร : SD-CL-00-041-01
	โรงพยาบาลศรีนครินทร์	ทบทวนล่าสุดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564	หน้าที่ 1 จาก 2

หมายเหตุ: สามารถดูรายละเอียดการเก็บสิ่งส่งตรวจในแต่ละรายการตรวจได้ที่คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (SD-CL-00-001-02) บนเว็บไซต์ <http://202.28.95.4/mdlab/>

เอกสารสำเนา